

producthandleiding

Summit Alpine orthese



Deze handleiding ontvangt u bij de nieuwe Summit Alpine Kids orthese en is bedoeld voor u als verzorgende. Lees voor een optimaal en veilig gebruik van de orthese deze handleiding aandachtig door en volg de adviezen op.

gebruik

Een Summit Alpine Kids orthese is bedoeld voor kinderen die behoefte hebben aan extra lichaamsondersteuning. Het biedt volledige contourondersteuning waardoor een betere rompbalans en meer stabiliteit wordt gecreëerd.

Door het creëren van de juiste zithouding worden de mogelijkheden van het lichaam optimaal benut en kan een deformatie van het lichaam zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast biedt de orthese meer comfort en rust tijdens langdurig zitten.

Voorwaarden voor een optimaal gebruik van de Alpine orthese.

- Een Summit Kids Alpine orthese is een individueel aangemeten product en kan daarom alleen door de gebruiker zelf gebruikt worden.
- Alleen bij een juiste afstelling van de rolstoel en orthese zal de Alpine Kids orthese de ondersteuning bieden zoals bepaald is door de orthesespecialist van Summit.
- De Alpine Kids orthese wordt gebruikt door gebruikers die niet zwaarder zijn dan 75 kg.
- De Alpine Kids orthese dient te worden gebruikt op een daarvoor geschikt en deugdelijk onderstel.
- De Alpine Kids orthese is niet bedoeld voor gebruik in extreem natte omstandigheden, bijvoorbeeld onder de douche. Hiervoor kan een speciale douche orthese gebruikt worden.
- De Alpine Kids orthese kan zowel binnens- als buitenshuis gebruikt worden.



LET OP!
wanneer de orthese blootgesteld wordt aan warmtebronnen of direct zonlicht, kan de temperatuur van de bekleding sterk oplopen. Dit is met name het geval bij donkere bekleding.

veiligheid

De Alpine orthesen van Summit zijn getest op brandveiligheid volgens de norm NEN-EN-ISO 7176-16. Hieruit blijkt dat alle gangbare combinaties van materialen voldoen.

De orthesen zijn voorzien van een CE conformiteitsverklaring en voldoen aan de essentiële eisen van verordening (EU) 2017/745 (MDR).

veilig vervoer


Summit Alpine orthesen zijn onderworpen aan diverse crashtests volgens de ISO 7176-19: 2008 norm. Hieruit blijkt dat de orthese geschikt is om als zitplaats te gebruiken in een voertuig. Dit geldt alleen wanneer de orthese op de juiste wijze is gemonteerd met de voorgeschreven montagehulpstukken, in combinatie met een rolstoelonderstel dat eveneens is goedgekeurd volgens de ISO 7176-19: 2008 norm. Alle goedgekeurde combinaties zijn terug te vinden op onze website en in het convenantenoverzicht van Firevaned.



LET OP!
Voor veilig vervoer dient de combinatie van orthese en onderstel als veilig te zijn geclassificeerd. Daarnaast dient het onderstel op de voorgeschreven wijze te zijn vastgezet in het voertuig. Dit is beschreven in de handleiding van het onderstel.


identificatielabel

Uw Alpine orthese is geheel persoonlijk voor u op maat gemaakt. Het product is daarom voorzien van een uniek nummer dat vermeld staat op het label. Hierop staat naast dit nummer, ook uw naam, productiedatum en type orthese vermeld. Bij de Alpine Kids is het label aan de binnenzijde van het kader aangebracht. (zie afbeelding).

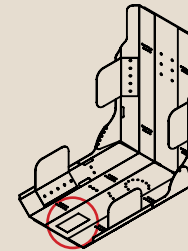

reiniging

Het is aan te raden de Alpine orthese wekelijks af te nemen met een vochtige doek. De hoes van de Alpine Kids is eenvoudig te verwijderen. Voor instructies zie handleiding: **'orthesebekleding wisselen - Alpine Plus & Kids'**. Wanneer de orthese nat/vochtig is, dient de hoes van de schuimdeel gehaald te worden om te drogen. De bekledingshoes kan met een 30 graden wolwas programma gewassen worden. Bij het wassen van de hoes dienen verder de volgende wasvoorschriften in acht genomen te worden:

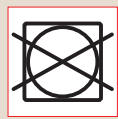

montage op het onderstel



LET OP!
Montage en instellingen mogen alleen gedaan worden door de specialisten van Summit of daartoe bevoegd persoon. Neem hiervoor contact op met uw hulpmiddelenleverancier.

garantie

De garantietermijn voor fouten en defecten in productie, constructie en materialen geldt 24 maanden. De periode waarin het product wordt uitgeprobeerd (pasfase) is de garantie op de gemaakte/gecreëerde zithouding, deze vervalt na de levering van het product.

De volgende zaken zijn uitgesloten van garantie van de orthese:

- Normale slijtage.
- Groei, wijziging van het lichaamsgewicht en overige lichaamsveranderingen.
- Wijzigingen in gebruik van medicatie en voeding.

aanpassingen en revisie

Het is mogelijk om een aanpassing of revisie uit te voeren aan uw orthese. Dergelijke aanpassingen aan uw orthese mogen alleen uitgevoerd worden door een specialist van Summit. Neem hiervoor contact op met uw hulpmiddelenleverancier.

- Voor reparatie van de orthese dient u contact op te nemen met uw hulpmiddelenleverancier. De hulpmiddelenleverancier zal vervolgens beslissen hoe de reparatie uitgevoerd zal worden.
- Onderdelen van de orthese of de bijbehorende accessoires kunnen worden vervangen. Neem hiervoor contact op met uw hulpmiddelenleverancier.
- Het is niet toegestaan zelf reparaties of aanpassingen uit te voeren aan uw orthese. In dit geval vervalt de garantie op de orthese.