

*Deze handleiding is ook online beschikbaar.
u kunt deze vinden in de downloadportal op
summit-benelux.com*

step 4

Bevestig de bekledingshoes aan het kader



Haak de bekledingshoes aan beide zijden van de Alpine Comfort orthese weer achter de paddenstoelknop.



Zorg dat de paddenstoelknop in de hoek van de hoes komt. Zo valt de hoes netjes op de plek.

aandachtspunt

Zorg dat de naden van de bekleding netjes corresponderen met de randen van de orthese.



Handleiding orthesebekleding wisselen

Alpine Comfort & Comfort Flex



handleiding

orthesebekleding wisselen



Deze handleiding ontvangt u bij uw nieuwe Summit Alpine Comfort of Comfort Flex orthese en is bedoeld voor u als gebruiker en/of uw verzorgende. Lees voordat u de orthesebekleding gaat vervangen deze handleiding aandachtig door en volg de adviezen op.

Dit document bevat informatie die betrekking heeft op het wisselen van de bekledingshoezen en het schoonmaken van het schuimdeel. De bekledingshoezen zijn op maat gemaakt en passen maar op één manier om het schuimdeel.

Neem bij vragen contact op met Summit Revalidatietechniek.

Houd de volgende wasvoorschriften in acht:



step 1

Haal de bekledingshoes los van het kader



Indien u in het bezit bent van een Alpine Comfort Flex orthese kunt u stap 1 overslaan en beginnen bij stap 2.



Haal de bekledingshoes aan beide zijden van de Alpine Comfort orthese los van de paddenstoelknop.

stap 2

Haal de bekleding van het schuimdeel



Haal vervolgens de hoes aan de bovenzijde van de orthese af. Doe dit met beleid zodat het elastiek aan de onder- en achterzijde niet kapot gaat.



Verwijder de hoes via de voorzijde van de orthese en de hoes is los van de orthese. Indien gewenst kan het schuimdeel met een vochtige doek afgenomen worden.

stap 3

Doe de bekleding om het schuimdeel



Trek de hoes over de voorzijde van de orthese en het kader.



Trek de hoes vervolgens over de bovenzijde van de orthese en het kader.