

Deze handleiding is ook online beschikbaar.
u kunt deze vinden in de downloadportal op
summit-benelux.com



Zorg dat de bekleding van het ruggedeelte netjes binnen de zijwangen valt.

step 4

Plaats het schuimdeel terug in het aluminium kader




Klittenband op de zitting: plaats het schuimdeel tegen het ruggedeelte van het kader. Laat het schuimdeel hierlangs naar beneden zakken. Controleer of het schuimdeel overal het ruggedeelte raakt.



Klittenband op de rugleuning: plaats het schuimdeel op de zitting en schuif het via de zitting naar achteren. Controleer of het schuimdeel overal het ruggedeelte raakt. Het klittenband op de zitting moet overeenkomen met dat op de hoes.

aandachtspunten

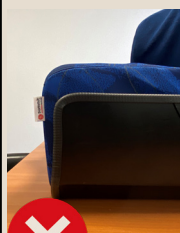

Het schuimdeel steekt 2 à 3 centimeter uit



aan de voorzijde. Bij de Kids zonder groeimodule is dit 1 centimeter



De bovenzijde van het schuimdeel moet aansluiten op het kader



Handleiding orthesebekleding wisselen

Alpine Plus & Alpine Kids



orthesen

summit-benelux.com

handleiding

orthesebekleding wisselen



Deze handleiding ontvangt u bij uw nieuwe Summit Alpine Plus of Alpine Kids en is bedoeld voor u als gebruiker en/of uw verzorgende. Lees voordat u de orthesebekleding gaat vervangen deze handleiding aandachtig door en volg de adviezen op.

Dit document bevat informatie die betrekking heeft op het wisselen van de bekleding en het terugplaatsen van het schuim in het kader. Dit is zeer belangrijk, want het niet juist uitvoeren van de stappen kan een nadelige invloed hebben op de zithouding. De bekleding is op maat gemaakt en past maar op één manier om het schuimdeel.

Neem bij vragen contact op met Summit Revalidatietechniek.

Houd de volgende wasvoorschriften in acht:



stap 1

Haal de orthese uit het aluminium kader



Trek de bovenzijde van het schuimdeel iets naar voren, zodat er een hand tussen het schuim en het aluminium kader kan.



Pak de onderzijde van het zitgedeelte vast en kanten het schuim naar voren. Zo komt het klittenband los en kan het schuimdeel uit het aluminium kader gehaald worden.

step 2

Haal de bekleding van het schuimdeel




Maak de kunststof sluiting aan de onderzijde van het schuimdeel los. Indien het bekleding met een rits betreft, dient deze helemaal open geritst te worden.



Haal de bekleding eerst los aan de bovenzijde van het schuimdeel en trek het vervolgens naar beneden. Doe dit met beleid zodat het schuim niet scheurt.

step 3

Doe de bekleding om het schuimdeel

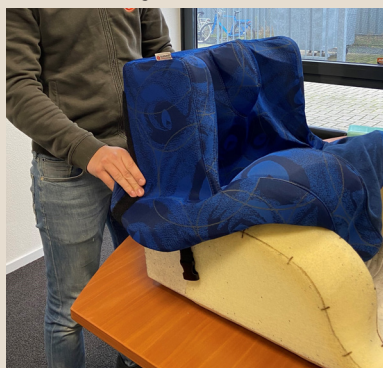

Doe de bekleding eerst over de voorkant van de zitting. Zorg dat de bekleding hier goed zit, anders geeft dit problemen bij de volgende stap.



Trek de bekleding over de bovenzijde van de orthese en zorg dat de het goed over de zijkanten valt. Trek de banden goed aan en sluit de klikgesp of rits. *

*Indien het een platilon zitting en/of rug betreft, moeten de twee elastische bandjes (aan de binnenzijde van de hoes) door het schuim gevoerd worden en aan de achterzijde van de orthese worden geknoopt. Zorg dat er geen plooiën in het platilon ontstaan.